

Colchón de aire antiescaras con compresor regulable de uso preventivo OPTIMAL 2000S - Optimal 2000S



Colchón de aire alternativo con compresor regulable desde 50 Kg. hasta 100 Kg. peso máximo de usuario, para la prevención de escaras. Especialmente indicado para usuarios de movilidad reducida ó sin movilidad alguna.

COMPRESOR Y COLCHON PARA PREVENCIÓN DE ESCARAS Modelo OPTIMAL 2000S INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Colocar el colchón sobre la cama con las entradas de aire a los pies del paciente.
Abrir las asas de la parte posterior de la bomba y colgarla a los pies de la cama.
Conectar las tuberías del colchón a la bomba y comprobar que no queden debajo del colchón.
Asegurarse de que los tubos quedan bien fijados.
Colocar una sábana entre el colchón de burbujas y el paciente.
Enchufar la unidad a la corriente eléctrica.
Conectar la bomba mediante el botón de encendido.
Ajustar el mando regulador según el peso del paciente, para mejorar su comodidad.

PESO PACIENTE

POSICIÓN REGULADOR

50KG

POSICIÓN 1 – 2

50 – 65 KG

POSICIÓN 3 – 4

65 – 25 KG

POSICIÓN 5 – 7

25 – 100 KG

POSICIÓN 2 – 10

INFORMACION DE SEGURIDAD

No utilizar el colchón si observa daños en el mismo.

Revise periódicamente el buen estado del cable eléctrico de alimentación, así como de su enchufe. Bajo ningún concepto intente quitar la carcasa que cubre la bomba, ya que puede existir riesgo de descarga eléctrica.

En caso de funcionamiento anómalo, revise el fusible.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Para la limpieza del colchón utilizar sólo detergente neutro, paño húmedo o desinfectante de uso común, no usar nunca paños abrasivos que puedan dañar el colchón.

Para la limpieza del compresor utilizar un paño húmedo. No usar ningún tipo de detergente/disolvente.

Atención: desenchufar el dispositivo de la red eléctrica antes de cada operación de limpieza.

CARACTERISTICAS

Tipología (Directiva 93/42/CEE) Dispositivo Médico Clase I

COMPRESOR

COLCHÓN DE BURBUJAS

Alimentación:
220V ~ – 50Hz

Dimensiones: 200x22x7 cm+ 90 cm de alas

Emisión del aire:
5.0 l/m

Numero casillas: 130 casillas de burbujas de aire

Variación presión:
60 mmHg ÷ 100 mmHg aproximadamente

Materiales: PVC de color beige conforme a la normativa CE

Tiempo del ciclo:
2 min.

Peso aproximado: 2,3 Kg

Potencia máxima:
10W

Utilización: para pacientes de 50 Kg hasta 100 Kg

Clase de seguridad eléctrica: clase II

Fusible electrico
de 500 mA

Dimensiones: 265(L)mm x 125(W)mm x 105(H)mm

Material caja: ABS

Peso aproximado 1,4 Kg

